

آیا می دانید با پاکیزه نگه داشتن سمعک و قالب می توانید بر طول عمر سمعک خود افزوده و از ورود آلودگی و آسیب به مدارات داخلی سمعک جلوگیری نمایید؟

به همین منظور

شما می توانید با استفاده از محصولات کمپانی صاحب نام Dreve آلمان همواره از پاکیزگی سمعک خود اطمینان داشته باشید!

محصولات ویژه سمعک های داخل گوشی



OtoVita. ست تمیز کننده سمعک های داخل گوشی

این ست با در برداشتن محصولات زیر، پوسته خارجی سمعک شما را ضد عفونی کرده و پاکیزه نگه می دارد:


- ✓ اسپری ضد عفونی کننده پوسته سمعک (۱ عدد) با آغشته کردن دستمال مرطوب به اسپری می توانید به صورت روزانه، کل سطح پوسته را به جز بخش مربوط به میکروفون سمعک ضد عفونی کنید.
- ✓ قرص رطوبتگیر (۲ عدد)، قابل استفاده مکرر تا زمانی که رنگ قرص به سفیدی متمایل شود
- ✓ محفظه ویژه خشک کردن سمعک با استفاده از قرص های رطوبت گیر (۱ عدد)
- ✓ برس آهنربایی ویژه تمیز کردن فیلتر سمعک (۱ عدد) جهت پاک کردن جرم گوش و یا رطوبت ناشی از اسپری، استفاده از آهنربا برای خارج کردن باتری سمعک
- ✓ همراه دفترچه راهنمای تصویری

OtoVita drying pallets. قرص های رطوبتگیر



- ✓ برای خشک کردن سمعک پس از تمیز کردن با دستمال مرطوب و اسپری
 - ✓ مصرف روزانه
 - ✓ حاوی ۱۲ عدد قرص رطوبتگیر
- کافی است سمعک را با یک عدد از قرص های رطوبتگیر در یک ظرف دربسته قرار دهید. تا زمانی که رنگ یک قرص به سفیدی متمایل شود می توانید از آن استفاده کنید.

رطوبت گیر برقی سمعک با ۲ سال گارانتی

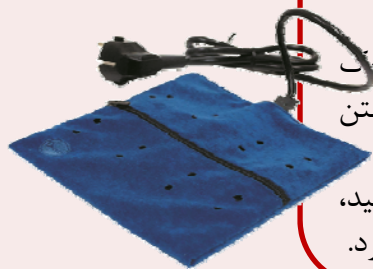

کیسه مجهز به خشک کن الکتریکی برای خشک کردن و رطوبتگیری سمعک داخل گوشی با مصرف حداقل برق، در عرض ۲ ساعت رطوبت ناشی از قرار گرفتن سمعک در گوش را زدوده و طول عمر سمعک را افزایش می دهد. کافی است زیپ کیسه را باز کنید و سمعک را با در باتری باز داخل آن قرار دهید، این کیسه با درجه حرارت ۴۰ درجه سانتی گراد رطوبت سمعک را از بین خواهد برد.

محصولات ویژه سمک های پشت گوشی



OtoVita. ست تمیز کننده سمک های پشت گوشی

این ست با در برداشتن محصولات زیر، به صورت روزانه سمک و قالب شما را ضد عفونی کرده و پاکیزه نگه می دارد:

- ✓ ظرف ویژه ضد عفونی کردن قالب سمک به وسیله قرص های تمیز کننده و آب (۱ عدد)
- ✓ قرص های تمیز کننده قالب ضد میکروب، ضد باکتری و ضد قارچ، کاهش دهنده خطر عفونت و التهاب گوش با نیاز به تنها ۳۰ دقیقه زمان جهت اثربخشی (۷ عدد)
- ✓ محفظه ویژه خشک کردن قالب و سمک با استفاده از قرص های رطوبتگیر (۱ عدد)
- ✓ قرص رطوبتگیر (۲ عدد)، قابل استفاده مکرر تا زمانی که رنگ قرص به سفیدی متمایل شود
- ✓ دمنده هوا، ویژه اطمینان از باز بودن شلنگ قالب و مسیر عبور صوت (۱ عدد)
- ✓ همراه دفترچه راهنمای تصویری

OtoVita drying pallets، قرص های رطوبتگیر قالب

- ✓ برای خشک کردن قالب پس از شستشو
- ✓ مصرف روزانه
- ✓ حاوی ۱۲ عدد قرص رطوبتگیر



کافی است قالب و سمک را با یک عدد از قرص های رطوبتگیر در یک ظرف دربسته قرار دهید. تا زمانی که رنگ قرص به سفیدی متمایل شود می توانید از آن استفاده کنید.


قرص های تمیز کننده قالب

- ✓ ضد میکروب، ضد باکتری و ضد قارچ
- ✓ کافی است این قرص ها را ۳۰ دقیقه به همراه قالب در محفظه دربسته پر از آب قرار دهید.
- ✓ این قرص ها با پاکیزه کردن قالب، خطر عفونت و التهاب گوش را به نحو چشمگیری کاهش می دهند.



رطوبت گیر برقی قالب با ۲ سال گارانتی

کیسه مجهز به خشک کن الکتریکی برای خشک کردن و رطوبتگیری قالب با مصرف حداقل برق، در عرض ۲ ساعت رطوبت ناشی از قرار گرفتن قالب در گوش را زدوده و طول عمر سمک را افزایش می دهد. کافی است زیپ کیسه را باز کنید و قالب و سمک را به صورت جداگانه با در باتری باز داخل آن قرار دهید، این کیسه با درجه حرارت ۴۰ درجه سانتی گراد رطوبت سمک را از بین خواهد برد.

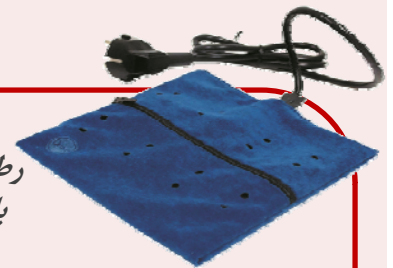

شرکت ندا سمک آشنا

نخ های تمیز کننده شلنگ قالب برای حصول اطمینان از خشک بودن و پاکیزگی فضای داخل شلنگ جهت عبور بهینه صوت

